



INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS MONOGAFAS

1. PROCEDIMIENTOS/ PROTOCOLOS EN LOS QUE APLICA

Procedimientos que generan aerosoles

2. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD DESCRITA

Detallar las actividades secuenciales necesarias para la limpieza y desinfección terminal de la monogafa que utiliza el personal de salud en las áreas asignadas para la atención de pacientes COVID-19 del Hospital General Docente de Calderón, garantizando el tiempo de vida útil de la EPP.

3. ALCANCE

El presente instructivo aplica a todo el personal de salud que labora en el HGDC desde el inicio de ingreso hasta el fin de la atención del paciente COVID-19.

4. INSUMOS NECESARIOS

EQUIPOS DE PROTECCIÓN

- Monogafas

SOLUCIONES Y DESINFECTANTES

- Alcohol etílico al 70%
- Detergente enzimático
- Agua corriente

DISPOSITIVOS

- Guantes de Manejo
- Bata descartable
- Gorro quirúrgico descartable
- Mascarilla quirúrgica

MATERIALES Y EQUIPO

- 1 contenedores
- 2 limpiones (microfibras de color diferenciado verde y blanco)
- Mesa auxiliar
- Un lavabo con agua corriente

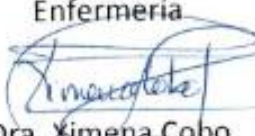
5. TAREAS A REALIZAR

N°	TAREA	REGISTRO DOCUMENTAL
1	El personal de Salud se coloca las coloca las prendas de protección personal, verifica que las soluciones desinfectantes se encuentren disponibles y no estén caducadas.	N/A



INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS MONOGAFAS

2	El personal de Salud sumerge las monogafas en el detergente enzimático que se encuentra en el contenedor. Y se deja actuar por 15 minutos.	N/A
3	El personal de Salud transcurrido los 15 minutos realiza el aclarado de las monogafas con abundante agua corriente.	N/A
4	El personal de Salud realiza el secado de las monogafas con una microfibr de color blanco, iniciando por las superficies planas de manera vertical de arriba hacia abajo, luego el contorno en un solo movimiento, se debe realizar de ambas caras, interna y externa y finalizamos en la banda elástica. En el caso que la banda elástica sea de tela se debe realizar la compresión fuerte para retirar la mayor cantidad de excedente agua.	N/A
5	El personal de Salud humedece al 10% la microfibr de color verde con alcohol etílico al 70%, iniciando la desinfección por las superficies planas de manera vertical de arriba hacia abajo, luego el contorno en un solo movimiento, se debe realizar de ambas caras, interna y externa y finalizamos en la banda elástica y de tela en el caso que lo amerite, dejar actuar.	N/A
6	El personal de salud una vez evaporado el alcohol etílico al 70%, colca en una funda plástica debidamente rotulada con fecha de desinfección.	N/A

ELABORADO POR:  Lic. Deysi Patiño Enfermera del Proceso de	REVISADO POR:  Dra. Malena Ortiz DIRECTORA ASISTENCIAL APROBADO POR:  Esp. René Enriquez GERENTE	REVISADO POR:  Lic. Elizabeth Córdova Responsable de gestión de Enfermería  Dra. Ximena Cobo RESPONSABLE DE CALIDAD  ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
--	---	--