



INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL VISOR

1. PROCEDIMIENTOS/ PROTOCOLOS EN LOS QUE APLICA		
Procedimientos que generan aerosoles		
2. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD DESCRITA		
Detallar las actividades secuenciales necesarias para la limpieza y desinfección terminal del visor que utiliza el personal de salud en las áreas asignadas para la atención de pacientes COVID-19 del Hospital General Docente de Calderón, garantizando el tiempo de vida útil de la EPP.		
3. ALCANCE		
El presente instructivo aplica a todo el personal de salud que labora en el HGDC desde el inicio de ingreso hasta el fin de la atención del paciente COVID-19.		
4. INSUMOS NECESARIOS		
EQUIPOS DE PROTECCIÓN Visor		
SOLUCIONES Y DESINFECTANTES - Alcohol etílico al 70% - Detergente enzimático - Agua corriente		
DISPOSITIVOS - Guantes de Manejo - Bata descartable - Gorro quirúrgico descartable - Mascarilla quirúrgica		
MATERIALES Y EQUIPO 1 contenedores 4 limpiadores (microfibras de color diferenciado roja, azul, verde y blanca) - Mesa auxiliar - Un lavabo con agua corriente		
5. TAREAS A REALIZAR		
Nº	TAREA	REGISTRO DOCUMENTAL
1	El personal de Salud se coloca las prendas de protección personal, verifica que las soluciones desinfectantes se encuentren disponibles y no estén caducadas	N/A
2	El personal de Salud coloca en un contenedor cantidad considerable de detergente enzimático para humedecer microfibra roja.	
3	El personal de Salud humedece al 10% la microfibra roja con detergente enzimático, inicia la limpieza por las superficies planas de manera vertical de	N/A



INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL VISOR

	arriba hacia abajo, luego el contorno en un solo movimiento, en el caso que lo amerite, se debe realizar de ambas caras, interna y externa y finalizamos en la banda rígida, elástica de plástico y de tela, en el caso que lo amerite, dejar actuar por 15 minutos.	
4	El personal de Salud transcurrido los 15 minutos realiza el aclarado del visor con abundante agua corriente.	N/A
5	El personal de Salud inicia el secado del visor con la microfibras blanca, iniciando por las superficies planas de manera vertical de arriba hacia abajo, luego el contorno en un solo movimiento, en el caso que lo amerite, se debe realizar de ambas caras, interna y externa y finalizamos en la banda rígida, elástica de plástico y de tela en el caso que lo amerite.	N/A
6	El personal de Salud humedece al 10% la microfibras color verde con alcohol etílico al 70%, iniciando la desinfección por las superficies planas de manera vertical de arriba hacia abajo, luego el contorno en un solo movimiento, se debe realizar de ambas caras, interna y externa y finalizamos en la banda rígida, elástica plástica y de tela en el caso que lo amerite, dejar actuar.	N/A
7	El personal de salud una vez evaporado el alcohol etílico al 70%, colca en una funda plástica debidamente rotulada con fecha de desinfección.	N/A

ELABORADO POR:


Lic. Deysi Patiño
Enfermera del Proceso de

REVISADO POR


Dra. Malena Ortiz
DIRECTORA ASISTENCIAL

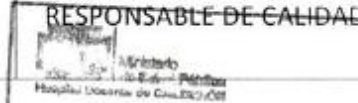
REVISADO POR:


Lic. Elizabeth Córdova
Responsable de gestión de
Enfermería

APROBADO POR:


Esp. Rená Enríquez
GERENTE


Dra. Ximena Cobo
RESPONSABLE DE CALIDAD


ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD