



## INSTRUCTIVO DE LUBRICACIÓN DE INSTRUMENTAL

1. PROCEDIMIENTOS /PROTOCOLOS EN LOS QUE APLICA		
Área de central de esterilización.		
2. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD DESCRITA		
Describir paso a paso la lubricación de instrumental después de haber sido lavado, esto ayuda a proteger el instrumental del óxido, corrosión y picaduras.		
3. INSUMOS NECESARIOS		
1. Instrumental. 2. Lubricante existente en el HGDC. 3. EPP.		
4. TAREAS A REALIZAR		
N°	TAREA	REGISTRO DOCUMENTAL
1	Utilizar guantes, mascarilla, gafas, mandil impermeable para manipular el instrumental.	N/A
2	Se coloca el instrumental quirúrgico con cerraduras, articulaciones y cremalleras en recipiente donde está el lubricante por 5 minutos. (Siga rigurosamente las instrucciones del fabricante).	N/A
3	Aplicar lubricante manualmente en articulaciones y tornillos antes de revisar su funcionamiento, distribuyendo el lubricante en las superficies de contacto mediante apertura y cierre repetidas veces del instrumento.	N/A
4	En el instrumental laparoscópico utilizar lubricante spray (Siga rigurosamente las instrucciones del fabricante).	N/A
5	Secar con un paño.	N/A
6	Se realiza inspección (instructivo).	N/A
7	Cerrar cremalleras hasta el primer diente para evitar las fisuras por tensión durante el calentamiento y enfriamiento en el proceso de esterilización.	N/A



**INSTRUCTIVO DE LUBRICACIÓN DE INSTRUMENTAL**

ELABORADO POR:	REVISADO POR	APROBADO POR:
 Lcda. Violeta Arcos <b>Coordinadora Técnica de Cuidados de Enfermería del Paciente Quirúrgico</b>	 Dra. Gladys Quevedo <b>Directora Asistencial</b>	 Dr. Jorge Peñaherrera <b>Gerente General</b>

