

INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EXTERNA RECURRENTE Y TERMINAL DE MAQUINAS DE DIÁLISIS DIAMAX- NIPRO

1. PROCEDIMIENTO / PROTOCOLOS EN LOS QUE APLICA

Manual de bioseguridad del paciente y usuario, Manual de Operaciones DIAMAX

2. OBJETIVO

Estandarizar los pasos y técnica de limpieza y desinfección externa de las máquinas de hemodiálisis DIAMA, con el fin de disminuir el riesgo de IAAS.

3. INSUMOS NECESARIOS

MATERIALES O INSUMOS

- Kit de microfibra de color rojo y azul
- Guantes de manejo
- Kit de frascos para la aplicación de detergente enzimático rotulado, agua.
- Prendas de protección: Gafas, gorro descartable, mascarilla, bata de seguridad y guantes de manejo.

DESINFECTANTE

- Detergente neutro debilitado con agua
- Agua

4. TAREA A REALIZAR

Nº	TAREA	REGISTRO DOCUMENTAL
a.- Actividades previas		
1	Higiene de manos según procedimiento institucional. https://drive.google.com/file/d/1V0AwtD1En0oJhwAYuIUzjmoP8psbT3jb/view?usp=sharing	Registro de verificación de Higiene de Manos
2	Verificar las especificaciones técnicas del fabricante en lo referente a la limpieza y desinfección.	Hoja técnica del equipo biomédico
3	Verificar que los insumos y soluciones estén vigentes y completos para utilizarlos.	Ficha Técnica del producto
4	Colocar los elementos de protección necesarios EPP (Gafas, gorro descartable, mascarilla, bata de seguridad y guantes de manejo).	Registro de uso de EPP

INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EXTERNA RECURRENTE Y TERMINAL DE MAQUINAS DE DIÁLISIS DIAMAX- NIPRO

5	Se utilizara una microfibra por cada máquina a desinfectar	Microfibra roja y blanca
<p>b.- Limpieza de máquinas de hemodiálisis DIAMAX parte frontal</p> 		
6	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar la microfibra roja ligeramente impregnado de detergente enzimático en un porcentaje del 10%. • Realizar la “técnica de arrastre” • Se realizara la desinfección (siempre de arriba hacia abajo) • Evitar repetir el paso de la microfibra varias veces por el mismo sitio). • Iniciar con la bandeja de medicación, levantar la misma. • Continuar por el panel de operaciones • Con los acopladores (DIAMAX) • La limpieza de la bomba de sangre, bomba de heparina y soporte de líneas. • Limpiar sensor de burbujas • Continuar con el panel frontal • Limpiar el soporte de soluciones • En la unidad de procesamiento y ruedas giratorias (siempre de arriba hacia abajo) • Dejar actuar por 15 minutos. 	<p>Registro de limpieza y desinfección de equipos biomédicos (ver anexo 1)</p>

INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EXTERNA RECURRENTE Y TERMINAL DE MAQUINAS DE DIÁLISIS DIAMAX- NIPRO

c.- Limpieza de máquinas de hemodiálisis DIAMAX lado izquierdo

7	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar la microfibra roja ligeramente impregnado de detergente enzimático en un porcentaje del 10%. • Iniciar con el soporte de la maquina • Continuar con los acopladores • Seguir con la vaina de boquillas de concentrado A y B 	Registro de limpieza y desinfección
---	--	-------------------------------------

d.-Limpieza de máquinas de hemodiálisis DIAMAX lado derecho

8	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar la microfibra roja ligeramente impregnado de detergente enzimático en un porcentaje del 10%. • Continuar con énfasis en el panel de sujetador de cartucho de bicarbonato en polvo • Panel derecho 	Registro de limpieza y desinfección
---	---	-------------------------------------

f.- Limpieza de máquinas de hemodiálisis parte posterior

9	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar la microfibra roja ligeramente impregnado de detergente enzimático en un porcentaje del 10%. • Iniciar con el semáforo de la maquina • Continuar con el brazalete incorporado en la maquina • Terminar limpiando las cubiertas del cartucho de endotoxinas • Poner énfasis en la bandeja de líquido desinfectante 	Registro de limpieza y desinfección
---	---	-------------------------------------

e.- Aclarado de maquina

10	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar la microfibra azul ligeramente impregnado de agua corriente en un porcentaje del 10%. • Utilizar la "técnica de arrastre". • Evitar repetir el paso de la microfibra varias veces por el mismo sitio. • Realizar la actividad hasta que observe que la superficie este visiblemente sin residuos del detergente enzimático. (aclarado) 	Registro de limpieza y desinfección
----	---	-------------------------------------

11	<p>Manuales y Registros: Ver link https://drive.google.com/drive/folders/1Tsk5CMwuohICsl8JvxJmM0jcyEZJHPGP?usp=share_link</p>	
----	---	--

INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EXTERNA RECURRENTE Y TERMINAL DE MAQUINAS DE DIÁLISIS DIAMAX- NIPRO

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Lcda. Amelia Montenegro	Coordinadora Técnica del proceso de diálisis	
Revisado por:	Lcda. Marisol Basantes	Responsable de la Gestión de Calidad	
	Lcda. Carolina Caizaluisa	Responsable de la Gestión de Enfermería	
	Lcda. Deysi Patiño	Responsable de limpieza y desinfección	
Validado por:	Dr. Danny Flores	Director Asistencial	
Aprobado por:	Dra. Malena Ortiz	Gerente General	